

Mode d'emploi masque barrière AFNOR SPEC S76-001

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

→ Mettre un masque barrière

-  Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.
-  Placer le masque barrière sur le visage.
-  Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles, sans les croiser.
-  Abaisser le bas du masque barrière sous le menton (vérifier que le masque couvre bien le menton).
-  Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.

→ Retirer un masque barrière

-  Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.
-  Retirer le masque barrière en saisissant par l'arrière les élastiques, sans toucher la partie avant du masque barrière.
-  Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre).
-  Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.

→ Laver et sécher un masque barrière

- Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble.

- Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.

-  Laver à 60°C, séchage recommandé au sèche-linge. Lavable jusqu'à 50 fois maximum.

REMARQUE

Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé. Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.
La durée de port doit être inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).